



THE POINT
ORTHODONTIC SOLUTIONS



AIR MAD

Informazioni utili e modo d'uso

Paziente



AIR MAD

MEDICAL DEVICE DIGITALE PER OSAS

La funzione del dispositivo AIR MAD è di **ridurre o alleviare il russamento notturno e l'apnea ostruttiva del sonno (OSA) lieve o moderata.**

È costruito sulle impronte digitali della bocca del paziente, inviate dall'odontoiatra sulla base di una registrazione di polisonnografia.

AIR MAD viene applicato al paziente dall'odontoiatra e permette l'**avanzamento mandibolare**. In questo modo, le vie aeree si aprono, dando la possibilità al paziente di respirare e non andare in apnea durante il sonno.

Ad ogni controllo l'odontoiatra, attraverso degli **avanzatori**, può aumentare la distanza di avanzamento della mandibola a beneficio del paziente.

LA PROGETTAZIONE

- AIR MAD OPEN AIR:

questo modello consente maggiore libertà di apertura della bocca durante l'utilizzo.

Se necessario, la bocca può essere bloccata applicando degli elastici anteriori su ganci specifici;

- AIR MAD SELF-LOCKING:

questo modello è auto-bloccante, il che significa che può essere bloccato e sbloccato automaticamente dal paziente con un semplice spostamento della mandibola di 1 mm.

COSA TROVI DENTRO ALLA SCATOLA

1 **DISPOSITIVO AIR MAD**

Il dispositivo è realizzato in Poliammide PA 12 e si compone di un bite superiore e inferiore, creati con un foro anteriore per il passaggio dell'aria e perfettamente combacianti tra loro.

2 **MODULI DI AVANZAMENTO LATERALI**


I moduli di avanzamento sono intercambiabili. Permettono di intersecare il bite superiore e inferiore con un'inclinazione perfetta di 70° e consentono un avanzamento della mandibola di 1 mm alla volta fino ad un massimo di 10 mm.

3 **CUSTODIA**

La custodia protegge il dispositivo dalla polvere, garantendo allo stesso tempo il ricircolo dell'aria.

4 **APPFRESH**

Liquido e spazzolino per la deterzione e igienizzazione degli apparecchi ortodontici. Ha un'azione profonda, rimuove le macchie, dona 24h di igiene e dura 2 mesi.

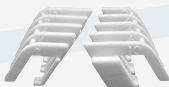

CONSIGLI PRATICI



Ogni mattina, dopo l'uso, **pulire accuratamente il dispositivo con AppFresh**. Non utilizzare acqua calda. Non immergere il dispositivo in perossido di idrogeno.



Asciugare completamente il dispositivo prima di riporlo nella custodia. Tenere **fuori dalla portata dei bambini** e degli animali domestici.



Spazzolare bene i denti e usare il **filo interdentale** prima di indossare il dispositivo AIR MAD.



Attenersi scrupolosamente alle **istruzioni cliniche** fornite dal clinico di riferimento che va contattato in caso di problematiche.



RESPIRI BENE, DORMI MEGLIO

AIR MAD è un dispositivo digitale per il **trattamento del russamento notturno e dell'apnea ostruttiva del sonno (OSA) lieve o moderata.**

Si tratta di un dispositivo di ingegneria ad altissima **precisione e qualità**, realizzato in materiale **biocompatibile** e **customizzato** per ogni paziente.

AIR MAD è un dispositivo **Sonnair**, il marchio The Point che tratta la Sindrome da apnee ostruttive del sonno (**OSAS**).



S O N N A I R

Respirare, dormire, vivere.



The Point Orthodontics



the_point_orthodontics



www.thepointorthodontics.com



segreteria@thepointorthodontics.com



Scannerizza il QR code e scopri
tutto quello che c'è da sapere su

Air Mad



Numero Verde

800 598 328