



THE POINT

ORTHODONTIC SOLUTIONS



SKUDO

Informazioni utili e modo d'uso

Paziente



SKUDO

PROTEGGI IL TUO SORRISO

Il sorriso è un'arma potentissima che aiuta a star meglio con gli altri e con noi stessi, ma può essere messo a dura prova, soprattutto quando corriamo il rischio di incorrere in un trauma.

SKUDO, l'innovativo **paradenti sportivo**, progettato e realizzato interamente in Italia dal network THE POINT, aiuta a proteggerti: **ammortizza e distribuisce i colpi su una superficie più ampia**, riducendo così l'intensità dell'impatto.

Tre le linee sviluppate ma unica la filosofia produttiva: offrire una protezione adeguata al tuo sorriso con soluzioni personalizzate che sono un concentrato di tecnologia e design.

Ti ricordiamo che i paradenti individuali possono essere **utilizzati anche da pazienti con apparecchiatura ortodontica fissa**.



COSA TROVI DENTRO ALLA SCATOLA

1 **PARADENTI SKUDO**

Il paradenti ammortizza e distribuisce i colpi su una superficie più ampia, riducendo così l'intensità dell'impatto.

2 **CUSTODIA**

La custodia protegge il dispositivo dalla polvere, garantendo allo stesso tempo il ricircolo dell'aria per evitare la comparsa di cattivi odori o formazioni batteriche.

3 **APPFRESH**

Liquido e spazzolino per la detersione e igienizzazione degli apparecchi ortodontici. Ha un'azione profonda, rimuove le macchie, dona 24h di igiene e dura 2 mesi.



CONSIGLI PRATICI



Il paradenti deve essere indossato **ogni volta che pratici attività fisica**, anche durante le sessioni di **allenamento**.



Dopo l'uso risciacqua e pulisci il paradenti utilizzando lo spazzolino e il **detergente igienizzante AppFresh** che trovi nella confezione. Si consiglia di non utilizzare dentifrici e di non immergere il paradenti nel collutorio perché potrebbero danneggiarne la superficie o scolorirla.



I paradenti sono **prodotti in etilene vinile acetato (E.V.A.)**, il calore può **rovinare il paradenti** quindi non lasciarlo in macchina o esposto alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo.



I paradenti sono **atossici e anallergici**.



Il paradenti ha **durata variabile in base all'utilizzo**. Se si tratta di un bambino in crescita, deve essere sostituito ogni sei mesi per non incidere nello sviluppo delle arcate dentarie; per atleti amatoriali (con attività 1/2 volte alla settimana) il paradenti dovrebbe essere sostituito indicativamente non oltre i due anni; per gli atleti professionisti, è consigliabile sostituire il paradenti ad ogni stagione sportiva.



Seguire le **istruzioni e indicazioni** del **proprio medico dentista**.

TRE LINEE PER LE TUE ESIGENZE

K-YOUNG

Per i campioni di domani.

Un modello flessibile che risponde alle esigenze della crescita, ideale per i giovani atleti dai 6 ai 16 anni. Garantisce un'ottima protezione in caso di traumi dentali.



K-PERFORMANCE

Per ogni tipo di sport.

Consigliato per chi pratica sport a livello agonistico. Assicura massima protezione dai possibili danni dentali causati da trauma da contatto o da caduta.



K-EXTREME

Per i professionisti.

La sovrapposizione degli strati ne aumenta lo spessore rendendolo la soluzione ideale per gli sportivi professionisti che si cimentano in discipline che prevedono il contatto fisico o forti impatti.





The Point Orthodontics



the_point_orthodontics



www.thepointorthodontics.com



segreteria@thepointorthodontics.com



Scannerizza il QR code e scopri
tutto quello che c'è da sapere su

Skudo



Numero Verde

800 598 328